

MINI-SYSTEM

STUHLPARASITEN ANREICHERUNGSSYSTEM



**FORMALIN
FREI**



- Geschlossenes System
- Zwei getrennte Filter
- Zentrifugalfiltration
- Optimale Größe für alle Zentrifugen
- Lösungsmittelfrei!
- Öko-SAF oder Formalinfrei



EINZIGARTIGES UND ANWENDERFREUNDLICHES SYSTEM FÜR DIE ZENTRIFUGALE ANREICHERUNG VON DARMPARASITEN

Geschlossenes-System

Das Sammelröhrchen, mit integriertem Löffel und Glasperlen zur Homogenisierung der Stuhlprobe, ist mit dem Sedimentationsrohr verschraubt. Das geschlossene System ist flüssigkeits- und luftdicht und schließt unangenehme Gerüche ein.

Doppeltes Filtersystem

Das im Sammelröhrchen integrierte doppelte Filtersystem ergibt ein sauberes Sediment für die mikroskopische Untersuchung. Dadurch erreicht man eine optimale Ausbeute der Darmparasiten.

Zentrifugalfiltration

Die Anreicherung findet während der Zentrifugation statt. Die Verwendung eines zweiten Filters entfernt kleine Stuhlpartikel und trennt die Fettanteile. Die Entfernung des Fettes vom Sediment wird dadurch ohne den Einsatz von Lösungsmitteln ermöglicht.

Kleine Sedimentationsröhrchen

Das kleine Mini-System passt in alle standard Zentrifugenröhrchen Aufsätze, reduziert Lagerraum und die Menge an Abfall. Die hohe Sensitivität und Ausbeute bleibt trotzdem erhalten.


Ecosaf Fixierlösung

Modifizierte Natrium Acetat, Formalin (SAF) Fixierlösung mit niedrigem Formaldehyd-Gehalt.



Paragreen Fixierlösung

Sichere Fixierlösung das kein Formalin, Alcohol bzw. Schwermetalle enthält und als unbedenklich (non-hazardous) klassifiziert ist.

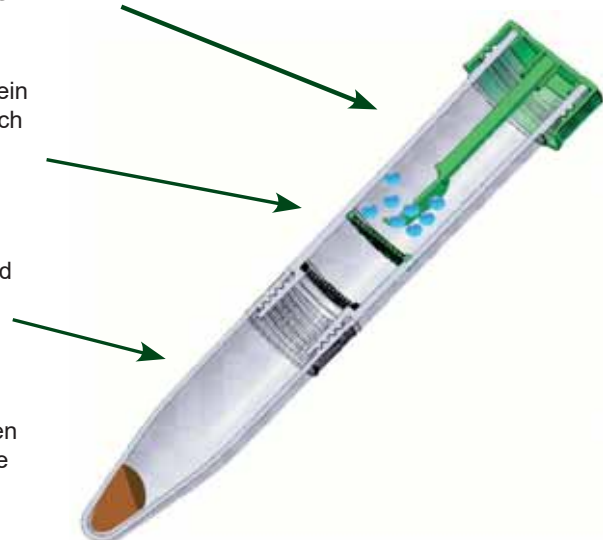


DURCHFÜHRUNG

1. Das Sammelröhrchen mit der Stuhlprobe fest verschrauben und für 30 sec. kräftig schütteln.



2. Die untere Kappe abschrauben und mit dem Sedimentationsröhrchen ersetzen. Fest zuschrauben!

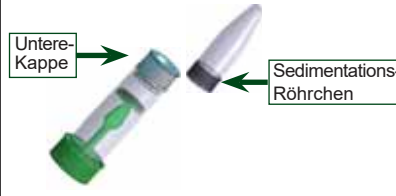

3. 3 Minuten bei 700g zentrifugieren.



4. Das Sedimentationsröhrchen abschrauben und entsorgen. Überstand vorsichtig abgießen. 1-2 Tropfen des Sediments auf einen Objektträger träufeln und bei Bedarf 1 Tropfen Jod-Lösung zugeben und mischen. Wie gewohnt mikroskopieren.



BESTELLINFORMATION:

BEST.-NR: 25RPP2000 Mini-System Ecosaf 150 Best.
BEST.-NR: 25RPP7000 Mini-System Paragreen 150 Best.



Im Vertrieb von:

Check Diagnostics GmbH

Dorfstr. 2 23847 Westerau
Tel.: 04539 181616 Fax.: 04539 181617
www.check-dx.de check@check-dx.de

Biolife

Biolife Italiana srl - Viale Monza 272, 20128 Milano - Tel. 02 25209.1 - www.biolifeitaliana.it